

Condoms Original

**FAIR
SQUARED**

Der Naturkautschuklatex, der für unsere Qualitätskondome verarbeitet wird, wurde fair gehandelt hergestellt. Unser Hersteller erhält einen Fair Trade Aufschlag, der ausschließlich für die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der Plantagenarbeiter und ihrer Familien verwendet wird. www.fairrubber.org



- MEDIZINPRODUKT
- FAIR RUBBER ZERTIFIKAT FÜR DIE AUS FAIREM HANDEL BEZIEHBAREN ROHSTOFFE, VEGAN SOCIETY ZERTIFIKAT
- FREI VON MIKROPLASTIK, BPA, PVC, THIURAM UND PHTHALATE.
- 100% FAIR GEHANDELTEN NATURKAUSCHUK
- TRANSPARENT, BEFEUCHTET, ZYLINDRISCH GEFORMT, MIT RESERVOIR
- NOMINALE BREITE: CA 54 MM, WANDSTÄRKE: CA 0,065 MM
- SPRACHEN AUF DER VERPACKUNG: DE-EN-FR-NL-IT-DK-SE-CZ-PL-ES-PT-TR-GR

WICHTIGE HINWEISE, BEVOR SIE EIN KONDOM VERWENDEN

Dieses Produkt besteht aus Naturkautschuklatex. Personen, die eine Allergie gegen Naturkautschuk haben, sollten dieses Produkt nicht verwenden. Bitte trocken lagern. Vor Sonnenlicht fernhalten. Nicht zweimal verwenden. Medizinprodukt Klasse 2b. Bitte lesen Sie vor der Verwendung die Gebrauchsanweisung. 1. Wenn zusätzliches Gleitmittel erforderlich ist, verwenden Sie wasserbasiertes Gleitmittel 2. Verwenden Sie keine ölbasierten Gleitmittel wie Vaseline, Mineralöl und Körpercreme, da diese das Kondom schwächen und zu einem späteren Versagen des Produkts führen können. Dies gilt auch für einige topische Medikamente, die auf den Penis oder die Vagina angewendet werden. Wenn Sie sich über die Wirkung der Arzneimittel, die Sie in Verbindung mit Kondomen anwenden, unsicher sind, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. 3. Verwenden Sie das Kondom nicht, wenn das Gummimaterial klebrig oder brüchig ist. Wenn der einzelne Behälter offensichtlich beschädigt ist, entsorgen Sie das Kondom und verwenden Sie ein neues aus einer unbeschädigten Verpackung. 4. Suchen Sie so bald wie möglich oder mindestens innerhalb von 72 Stunden einen Arzt auf, falls ein Kondom während des Gebrauchs ausläuft oder platzt. 5. Kondome sind nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Wiederverwendete Kondome können das Risiko von Beschädigung und Infektion erhöhen. 6. Bei richtiger Anwendung bei jedem Geschlechtsverkehr helfen Latexkondome eine Schwangerschaft zu verhindern und das Risiko der Übertragung von HIV/AIDS und anderen sexuell übertragbaren Infektionskrankheiten zu verringern. 7. Keine Verhütungsmethode kann einen hundertprozentigen Schutz gegen Schwangerschaft oder Übertragung von HIV und sexuell übertragbaren Krankheiten bieten. Wenn Sie den Verdacht haben, dass Sie oder Ihr Partner schwanger sind oder infiziert wurden, wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt. 8. Dieses Produkt enthält Naturlatex, das allergische Reaktionen einschließlich einem anaphylaktischen Schock hervorrufen kann. Wenn Sie allergisch gegen Naturlatexprodukte sind, wenden Sie sich vor der Anwendung an Ihren Arzt. 9. An einem kühlen,

trockenen Ort aufbewahren und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. 10. Von Kindern fernhalten. 11. Bei der oralen Anwendung von Kondomen besteht die Gefahr des Erstickens. 12. Die Verwendung zusätzlicher Gleitmittel beim Analverkehr kann das Risiko von Beschädigungen verringern. 13. Ein Kondom ist ein Medizinprodukt für erwachsene Männer oder Frauen. 14. Melden Sie jeden schwerwiegenden Zwischenfall, der bei der Verwendung des Kondoms auftritt, dem Hersteller und der jeweils zuständigen Behörde. 15. Diese Kondome entsprechen den internationalen Normen ISO 4074 / EN ISO 4074.

ANLEITUNG ZUR BENUTZUNG EINES KONDOMS

(1) Folienpackung vorsichtig aufreißen und dabei darauf achten, dass das Kondom nicht beschädigt wird. (2) Vermeiden Sie beim Entfernen der Folie eine Beschädigung des Kondoms durch Fingernägel, Schmuck usw. (3) Drücken Sie das Reservoir des Kondoms vorsichtig zwischen Daumen und Zeigefinger, um die Luft aus der Spitze zu entfernen, während Sie das Kondom über den Kopf des erigierten Penis legen. Dies muss erfolgen, bevor ein Kontakt zwischen dem Penis und dem Körper des Partners entsteht, um sexuell übertragbare Infektionen und Schwangerschaften zu verhindern. (4) Während Sie die Reservoirspitze halten, rollen Sie das Kondom mit der anderen Hand über die gesamte Länge des erigierten Penis ab. (5) Prüfen Sie, ob das Kondom vom Penis abrutscht oder zu fest sitzt, da dies zu einer Beschädigung führen kann. (6) Halten Sie nach der Ejakulation den Rand des Kondoms fest und ziehen Sie den Penis langsam heraus, während er noch erigiert ist, damit das Kondom nicht abrutscht. (7) Entfernen Sie das Kondom von Ihrem Penis, indem Sie es langsam abziehen. Es ist wichtig, dass der Penis oder das benutzte Kondom nach dem Abziehen nicht den vaginalen Bereich berührt. (8) Wickeln Sie das gebrauchte Kondom ein und entsorgen Sie es hygienisch in einem geschlossenen Mülleimer.

PRODUKTNAME	ART.-NR.	VE	EAN CODE
FAIR SQUARED CONDOMS ORIGINAL, 10 PCS.	4719646	8	4260365853109
FAIR SQUARED CONDOMS ORIGINAL, 100 PCS.	4719653	1	4260365853093

• ZOLLTARIF-NR.: 40141000



FAIR SQUARED GmbH
Hermann-Heinrich-Gossen-Straße 4
D-50858 Köln (Cologne), Germany
Telefon +49 (0) 2234 929 66 00
info@fairsquared.com
www.fairsquared.com